


PIKAOHJEET - ERKAMETER 125 PRO

Erkameter 125 PRO on varustettu kosketusnäytöllä.

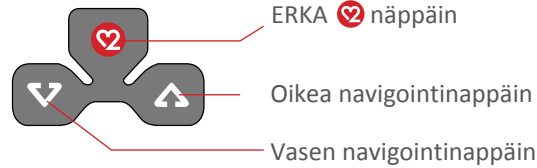

VERENPAINENEN MITTAAMINEN

1. Käynnistä laite; paina ja pidä pohjassa ERKA ♥ näppäintä noin 3 sekunnin ajan.

2. Valitse haluamasi verenpainemittaus tapa:



NOPEA AUTOMAATTINEN MITTAUS:

- täysin automaattinen mittaus tapa, kuten tavallisessa verenpainemittarissa

Tämän mittaustavan valitsemisen jälkeen:

1. Aseta mansetti oikein vasempaan käteen.
2. Aloita mittaus painamalla ERKA ♥ näppäintä.
3. Mittauksen jälkeen arvot näkyvät ruudulla ja tallentuvat automaattisesti laitteen muistiin.

Voit myös keskeyttää mittauksen painamalla ERKA ♥ näppäintä.



EDISTYNYNEEMPI AUTOMAATTINEN MITTAUSTAPA:

- 2 automaattista mittausjaksoa, joiden välillä on 1 minuutin lepojakso

- lopulliset arvot muodostuvat näiden kahden mittauksen keskiarvoista

Tämän mittaustavan valitsemisen jälkeen:

1. Aseta mansetti oikein vasempaan käteen.
2. Aloita mittaus painamalla ERKA ♥ näppäintä.
3. Näytölle ilmestyy kellon kuva. Tästä alkaa 60 sekunnin lepojakso, jonka jälkeen mittaus alkaa.
4. Ensimmäisen mittauksen jälkeen näytölle ilmestyy taas kellon kuva. Mittari laskee 60 sekunnin lepojakson ja sen jälkeen automaattisesti aloittaa toisen mittausjakson.
5. Toisen mittauksen jälkeen arvot näkyvät ruudulla ja tallentuvat automaattisesti laitteen muistiin.

Näytöllä näkyvät arvot ovat molempien mittausjaksojen keskiarvo.

Voit myös keskeyttää mittauksen painamalla ERKA ♥ näppäintä.



KLASSINEN MITTAUS STETOSKOOPIN KANSSA:

- mittaus tapahtuu stetoskooppia apuna käyttäen

- ainoastaan pumppaus ja tallennus muistiin tapahtuvat automaattisesti

Tämän mittaustavan valitsemisen jälkeen:

1. Valitse kuinka korkealle haluat mittarin pumppaavaan paineen.
 2. Aseta mansetti oikein vasempaan käteen.
 3. Aseta stetoskopin rintaosa oikealle paikalle mansetin alle.
 4. Aloita mittaus painamalla ERKA ♥ näppäintä.
 5. Mittari pumppaa niin pitkään kunnes se on saavuttanut asettamasi paine-ajan ja sen jälkeen alkaa vapauttamaan ilmaa.
 6. Käytä stetoskooppia määrittämään yläpaine-arvo (SYS) ja tallenna se painamalla ERKA ♥ näppäintä. Arvo tulee näkyviin ruudulla.
 7. Mittari tulee jatkamaan paineen vapauttamista.
 8. Käytä nyt stetoskooppia määrittämään alapaine-arvo (DIA) ja tallenna se painamalla ERKA ♥ näppäintä. Arvo tulee näkyviin ruudulla.
 9. Mittauksen jälkeen arvot näkyvät ruudulla ja tallentuvat automaattisesti laitteen muistiin.
- Voit myös keskeyttää mittauksen painamalla ERKA ♥ näppäintä.

4. Laite sammuu toimeettomana automaattisesti 30 sekunnin kuluttua. Laitteen voi myös sammuttaa painamalla OFF-kuvaketta päävalikossa.

MUIDEN KUVAKKEIDEN, NÄPPÄINTEN JA TOIMINTOJEN KUVAUS



MUISTI: Mittaustulokset tallentuvat automaattisesti aika- ja päivä-merkinnällä. Jokaisella mittaustavalla on 500 muistipaikkaa. Tallennettuja mittaustuloksia voi tarkastella painamalla Muisti-kuvaketta ja valitsemalla mittaustapa jonka tuloksia halutaan tarkastella.



Palaa päävalikkoon



Palaa edelliseen ruutuun



Keskeytä näppäin (esim. mittauksen keskeyttämiseen)



OFF kuvake - laitteen sammuttaminen (päävalikosta)



Asetukset (päivämäärä, aika, kieli: englanti tai saksa)



Verenpainemittarin yhdistäminen myERKA.PRO ohjelmaan (tietokone)



Verenpainemittarin yhdistäminen laitoksen ohjelmistokantaan