

PIKAOHJEET - ERKAMETER E / E Flex

Erkameter E / E Flex on varustettu kosketusnäytöllä.



VERENPAINEEEN MITTAAMINEN

1. Tarkista että laite on kytketty verkkovirtaan (vain ERKAMETER E).

2. Käynnistä laite; paina ja pidä pohjassa ERKA ♥ näppäintä noin 3 sekunnin ajan.

3. Valitse haluamasi verenpainemittaustapa:



NOPEA AUTOMAATTINEN MITTAUS:

- täysin automaattinen mittaustapa, kuten tavallisessa verenpainemittarissa
Tämän mittaustavan valitsemisen jälkeen:

1. Aseta mansetti oikein vasempaan käteen.
2. Aloita mittaustapa painamalla ERKA ♥ näppäintä.
3. Mittauksen jälkeen arvot näkyvät ruudulla ja tallentuvat automaattisesti laitteen muistiin.

Voit myös keskeyttää mittauksen painamalla ERKA ♥ näppäintä.



EDISTYNYNEEMPI AUTOMAATTINEN MITTAUSTAPA:

- 2 automaattista mittaustapa, joiden välillä on 1 minuutin lepojakso
- lopulliset arvot muodostuvat näiden kahden mittauksen keskiarvoista

Tämän mittaustavan valitsemisen jälkeen:

1. Aseta mansetti oikein vasempaan käteen.
2. Aloita mittaustapa painamalla ERKA ♥ näppäintä.
3. Näytölle ilmestyy kellon kuva. Tästä alkaa 60 sekunnin lepojakso, jonka jälkeen mittaustapa alkaa.
4. Ensimmäisen mittauksen jälkeen näytölle ilmestyy taas kellon kuva. Mittari laskee 60 sekunnin lepojakson ja sen jälkeen automaattisesti aloittaa toisen mittaustavan.
5. Toisen mittauksen jälkeen arvot näkyvät ruudulla ja tallentuvat automaattisesti laitteen muistiin.

Näytöllä näkyvät arvot ovat molempien mittaustavojen keskiarvo.

Voit myös keskeyttää mittauksen painamalla ERKA ♥ näppäintä.



KLASSINEN MITTAUS STETOSKOOPIN KANSSA:

- mittaustapa tapahtuu stetoskooppia apuna käyttäen
- ainoastaan pumppaus ja tallennus muistiin tapahtuvat automaattisesti

Tämän mittaustavan valitsemisen jälkeen:

1. Valitse kuinka korkealle haluat mittarin pumppaavaan paineen.
2. Aseta mansetti oikein vasempaan käteen.
3. Aseta stetoskopin rintaosa oikealle paikalle mansetin alle.
4. Aloita mittaustapa painamalla ERKA ♥ näppäintä.
5. Mittari pumppaa niin pitkään kunnes se on saavuttanut asettamasi paine-ajan ja sen jälkeen alkaa vapauttamaan ilmaa.
6. Käytä stetoskooppia määrittämään yläpaine-arvo (SYS) ja tallenna se painamalla ERKA ♥ näppäintä. Arvo tulee näkyviin ruudulla.
7. Mittari tulee jatkamaan paineen vapauttamista.
8. Käytä nyt stetoskooppia määrittämään alapaine-arvo (DIA) ja tallenna se painamalla ERKA ♥ näppäintä. Arvo tulee näkyviin ruudulla.
9. Mittauksen jälkeen arvot näkyvät ruudulla ja tallentuvat automaattisesti laitteen muistiin.

Voit myös keskeyttää mittauksen painamalla ERKA ♥ näppäintä.

4. Laite sammuu toimeettomana automaattisesti 30 sekunnin kuluttua. Laitteen voi myös sammuttaa painamalla OFF-kuvaketta päävalikossa.

MUIDEN KUVAKKEIDEN, NÄPPÄINTEN JA TOIMINTOJEN KUVAUS



MUISTI: Mittaustulokset tallentuvat automaattisesti aika- ja päivä-merkinnällä. Jokaisella mittaustavalla on 500 muistipaikkaa. Tallennettuja mittaustuloksia voi tarkastella painamalla Muisti-kuvaketta ja valitsemalla mittaustapa jonka tuloksia halutaan tarkastella.



Palaa päävalikkoon



Palaa edelliseen ruutuun



Keskeytä näppäin (esim. mittauksen keskeyttämiseen)



OFF kuvake - laitteen sammuttaminen (päävalikosta)



Asetukset (päivämäärä, aika, kieli: englanti tai saksa)



Verenpainemittarin yhdistäminen myERKA.PRO ohjelmaan (tietokone)



Verenpainemittarin yhdistäminen laitoksen ohjelmistokantaan